



# mediven® Phlebology

Медицинский компрессионный трикотаж



medi. I feel better.

# Венозная недостаточность – болезнь цивилизации

Известные еще со времен Древнего Египта различные заболевания венозной системы нижних конечностей в той или иной степени встречаются более чем у половины населения трудоспособного возраста. Только в РФ в лечебной помощи нуждаются более 35 миллионов человек. Заболевания вен чаще всего поражают женщин. Распространенность варикозного расширения вен нижних конечностей у беременных при учете всех форм заболевания достигает 70 %.

При любой клинической форме хронического заболевания вен (ХЗВ), независимо от причины его возникновения, показана компрессионная терапия. Одним из наиболее современных и эффективных способов компрессионного лечения является применение медицинского компрессионного трикотажа.

## Показания к применению медицинского компрессионного трикотажа\*

| Показания                         | Профилактический А-класс | Лечебные классы компрессии |           |           |           |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |                          | 1-й класс                  | 2-й класс | 3-й класс | 4-й класс |
| Синдром усталых ног               | ++                       | ++                         | +         |           |           |
| Статические нагрузки, путешествия | ++                       | ++                         | +         |           |           |
| Ограниченные формы (C1 – C2)      | +                        | ++                         | (+)       |           |           |
| Выраженные формы (C2S)            | (+)                      | +                          | ++        |           |           |
| C3                                |                          | +                          | ++        |           |           |
| C4 – C5 ПТБ**                     |                          |                            | ++        | +++       | ++        |
| C6                                |                          |                            |           | +++       | ++        |
| Лимфедема                         |                          |                            |           | +++       | +++       |
| Липедема                          | (+)                      | ++                         | ++        | (+)       |           |
| Послеоперационный период          |                          | +                          | ++        |           |           |
| Склеротерапия ТАЭ***              |                          | +                          | +         |           |           |
| Склеротерапия варикозных вен      | (+)                      | +                          | ++        |           |           |
| Беременность                      | (+)                      | ++                         | ++        |           |           |
| ТГВ**** и ПТБ                     |                          | +                          | ++        |           |           |
| Профилактика ТГВ и ПТБ            | (+)                      | +                          | ++        |           |           |

### Примечания

\* Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению хронических заболеваний вен, журнал «Флебология», № 2, выпуск 2, 2013 г., том 7, издательство «МЕДИА СФЕРА», Москва.

\*\* ПТБ – посттромботическая болезнь; \*\*\* ТАЭ – телеангиэктазии; \*\*\*\* ТГВ – тромбоз глубоких вен.


## Основные механизмы действия эластической компрессии

- Компрессия межмышечных венозных сплетений и перфорантных вен приводит к значительному увеличению пропульсивной способности мышечно-венозной помпы голени и снижению патологической венозной емкости нижних конечностей.
- Уменьшение диаметра подкожных и глубоких вен приводит к улучшению функционирования относительно недостаточного клапанного аппарата и возрастанию скорости венозного кровотока.
- Повышение тканевого давления увеличивает резорбцию внеклеточной жидкости в венозном колене капилляра и уменьшает ее фильтрацию в артериальном, что приводит к регрессу отека.
- Увеличение фибринолитической активности крови за счет более интенсивной выработки тканевого активатора плазминогена улучшает реологические свойства крови (феномен, связанный с сокращением мышц в ограниченном объеме).
- Увеличение скорости лимфотока.

## Медицинский компрессионный трикотаж

**Профилактический А-класс:** создает давление не более 18 мм рт. ст. на уровне лодыжек.

**Лечебный:** обеспечивает высокий уровень физиологически распределенного давления (от 18 до 49 и более мм рт. ст. на уровне лодыжек). При этом давление, обусловленное воздействием компрессии, должно распределяться следующим образом: 100 % – на уровне лодыжек, 70 % – на уровне верхней трети голени, 40 % – на уровне верхней трети бедра. Размер изделия подбирается строго по индивидуальным анатомическим меркам конечности пациента. Лечебный компрессионный трикотаж должен соответствовать европейскому стандарту RAL-GZ387 и иметь сертификат экологической безопасности Oeko-TexStandard 100. Соответствующая маркировка наносится на упаковку и на ярлык, вшитый в само изделие.

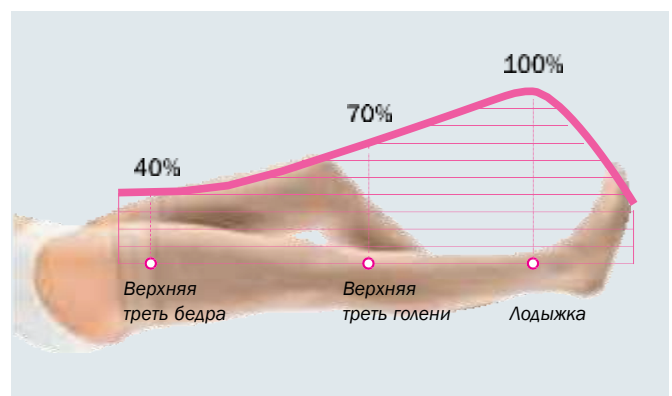

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ

## У компрессии есть имя – mediven®

Компания medi (Германия) — один из мировых лидеров по разработке и производству медицинского компрессионного трикотажа и ортопедических изделий. На протяжении многих десятилетий главными ориентирами в работе компании medi остаются высокое качество продукции, инновации, удовлетворение нужд конечных потребителей и бизнес-партнеров. Высокое качество, эффективность и безопасность продукции medi гарантированы соответствием самым строгим европейским и международным стандартам.

Более 65 лет исследований и совместной творческой работы врачей, инженеров, технологов и дизайнеров компании medi по совершенствованию компрессионных изделий позволили создать и внедрить в производство комплекс уникальных инновационных технологий, объединенных под новым товарным знаком компании — medi compression. Продукция medi compression отличается функциональностью и высокой эффективностью, широким разнообразием, первоклассным качеством исполнения, непревзойденным комфортом при использовании и производится согласно последним мировым тенденциям в медицине, моде и спорте. Все это позволяет пользователям чувствовать себя лучше и выглядеть современно и стильно.

Одно из направлений деятельности компании medi — разработка и производство компрессионного трикотажа mediven для лечения заболеваний вен нижних конечностей.

Лечебный трикотаж mediven производится согласно самому строгому европейскому стандарту для медицинских эластических компрессионных изделий RAL-GZ387. Нормы стандарта RAL-GZ387 регламентируют состав и безопасность материала, компрессионные свойства, эластичность, прочность трикотажа, требования к упаковке, маркировке и др. Согласно требованиям стандарта RAL-GZ 387 лечебный компрессионный трикотаж маркируется в миллиметрах ртутного столба с указанием класса компрессии (I–IV). Размер необходимо подбирать строго по индивидуальным анатомическим меркам конечности пациента. Соответствие компрессионного трикотажа mediven требованиям стандарта RAL-GZ 387 гарантирует сохранение лечебного профиля давления в течение 6 месяцев при ежедневном использовании и стирке. Логотип стандарта RAL-GZ 387 находится на упаковке и нашитом в изделие ярлыке. Постоянный контроль над производственным процессом с использованием измерительной системы HOSY гарантирует безусловное качество и высокую медицинскую эффективность трикотажа mediven.

Трикотаж mediven производится в соответствии с международным стандартом Oeko-TexStandard 100, является гипоаллергенным, не раздражает даже чувствительную кожу, обеспечивая максимальный комфорт и удобство при длительном использовании.

Гарантия качества изделий mediven обеспечивается также производством продукции в соответствии с международными стандартами управления качеством DIN EN ISO 9001:2000/DIN EN 13485.

Точное соответствие трикотажа mediven анатомическим особенностям конечностей обеспечивается наличием самого широкого диапазона стандартных размеров, что позволяет легко подобрать подходящее лечебное изделие для 90–95 % обращающихся за помощью пациентов. В остальных случаях возможно изготовление на заказ.




Отличительная особенность лечебного трикотажа mediven — многообразие модельных рядов, разработанных с учетом требований самых взыскательных потребителей к внешнему виду изделий, а также для использования в различных клинических случаях.

**То, что нельзя увидеть, можно почувствовать.**

**medi. Почувствуйте себя лучше.**



## Показания к применению медицинского компрессионного трикотажа medi

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>A класс<br/>компрессии</b><br>10–18 мм рт. ст.   | профилактика «синдрома тяжелых ног»<br>статические нагрузки<br>путешествия<br>занятия спортом  | <b>m class</b><br>medi travel  |   |
| <b>1-й класс<br/>компрессии</b><br>18–21 мм рт. ст. | «синдром тяжелых ног»<br>склонность к отекам<br>профилактика варикозной болезни у беременных<br>ретикулярный (сетчатый) варикоз, телеангиэктазии<br>функциональные флебопатии<br>профилактика тромбоза глубоких вен                              | mediven elegance<br>mediven comfort<br>mediven plus<br>mediven active<br>Duomed<br>mediven 550 (на заказ)                  |   |
| <b>2-й класс<br/>компрессии</b><br>23–32 мм рт. ст. | варикозная болезнь, в том числе у беременных<br>варикотромбофлебит<br>компрессионная терапия после флебосклерозирования<br>профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска  | mediven elegance<br>mediven comfort<br>mediven plus<br>mediven active<br>mediven forte<br>Duomed<br>mediven 550 (на заказ) |   |
| <b>3-й класс<br/>компрессии</b><br>34–46 мм рт. ст. | варикозная болезнь с трофическими расстройствами и отеками<br>компрессионная терапия после хирургических вмешательств<br>на венах нижних конечностей<br>тромбоз глубоких вен<br>посттромбофлебитическая болезнь<br>лимфовенозная недостаточность | mediven plus<br>mediven forte<br>mediven ulcer kit<br>mediven 550 (на заказ)   |   |
| <b>4-й класс<br/>компрессии</b><br>>49 мм рт. ст.   | лимфедема<br>врожденные флебодисплазии   | mediven 550 (на заказ)   |  |

## Абсолютные противопоказания

Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, когда регионарное систолическое давление на a.tibialis posterior ниже 80 мм рт. ст. Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии. Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Трофические язвы венозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит. Индивидуальная непереносимость материала.

## Относительные противопоказания

Нарушение чувствительности.

## Технологии и инновации medi



**Clima Comfort** — инновационная технология вязки изделий из уникальных материалов, благодаря которой поддерживается оптимальный водный и температурный баланс кожи в любое время года.



**Clima Fresh** — запатентованная технология вязки Clima Fresh создает бактериостатический эффект за счет включения в структуру ткани ионов серебра, предотвращает появление неприятного запаха и позволяет сохранять ощущение свежести в течение всего дня.



**Perfect Fit** — высокотехнологичная эластичная нить обеспечивает способность трикотажа растягиваться в продольном и поперечном направлениях, что позволяет добиться правильного, без образования складок, распределения изделия по ноге, а также легкости надевания и снятия компрессионного трикотажа.



**Soft Elastic** — новая технология вязки, придающая изделиям с закрытым носком дополнительную мягкость и эластичность в тыльной области стопы и тем самым обеспечивающая еще больший комфорт при использовании.



**Variety** — семь стандартных размеров с шагом 2 см над уровнем лодыжек, две длины, многообразие видов изделий и дополнительных опций для удовлетворения потребностей самого широкого круга пользователей.



Не содержит латекс.





## mediven® elegance

Нежные, элегантные, приятные на ощупь и в то же время удивительно прочные компрессионные изделия модельного ряда mediven elegance (МЕДИВЕН ЭЛЕГАНС) представляют собой уникальное сочетание медицинской эффективности, удобства в использовании и чрезвычайно привлекательного внешнего вида.

Воплотивший в себе все передовые технологии и инновации в области исследований, разработки и производства лечебного компрессионного трикотажа модельный ряд mediven elegance устанавливает новые стандарты.

- гольфы, чулки, колготки, колготки с заниженной талией, колготки для беременных — 1 и 2 классов компрессии с закрытым носком
- укрепленные практичные носочная и пяточная области
- новые типы кружевных резинок на силиконовой основе для чулок с интегрированным механизмом остановки спущенной петли; трикотажная резинка для чулок под пояс
- стандартные цвета: черный, антрацит, темно-синий, кашмир, карамель, розэ, бронза, бежевый, магента, белый
- модные сезонные цвета
- узоры с оригинальными кристаллами Swarovski®1

### Откройте для себя секрет mediven® elegance


Секрет заключается в уникальной запатентованной вязке. Эта вязка позволяет в меньшей степени чувствовать компрессию и обеспечивает больший комфорт при использовании изделий.

Немецкий патентный департамент в конце 2013 года выдал компании mediv патент на гибридную нить и на производство продукции по технологии гибридной вязки, определив эту разработку компании mediv как инновацию. 20 лет патентной защиты.

### Ощутимые преимущества инноваций

- меньше усилий для растяжения материала
- сниженная тенденция к скольжению и сползанию
- наилучшая «посадка» и комфорт при использовании
- вы не чувствуете реальное давление — оно кажется меньшим при полном сохранении компрессионных характеристик изделия.

#### Преимущества

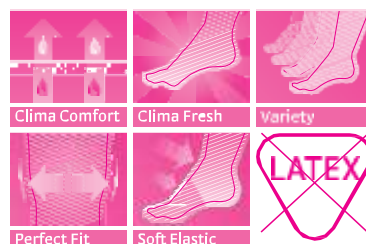

#### Типы резинок для чулок

|  |   |
|--|---|
|  | Резинка кружевная на силиконовой основе в виде ленты (FBR) (стандартный вариант)            |
|  | Резинка на силиконовой основе в виде микро капель для чувствительной кожи (MBs) (под заказ) |
|  | Резинка с декоративным узором на силиконовой основе в виде капель (NoM) (под заказ)         |
|  | Резинка на силиконовой основе в виде капель (NoB) (под заказ)                               |

#### Таблица моделей mediven elegance

| Виды изделий         | AD   | AD (M)       | AG                                  | AG (M)                              | AT <sup>2</sup> | AT (M) <sup>2</sup> | ATU                     | ATU (M)                       |
|----------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                      |  |              |                                     |                                     |                 |                     |                         |                               |
|                      | Гольфы   | Гольфы малые | Чулки                               | Чулки малые                         | Колготки        | Колготки малые      | Колготки для беременных | Колготки для беременных малые |
| 1-й класс компрессии | 185  | 186          | 187 <sup>3</sup> , 189 <sup>4</sup> | 188 <sup>3</sup> , 190 <sup>4</sup> | 191             | 192                 | 193                     | 194                           |
| 2-й класс компрессии | 285  | 286          | 287 <sup>3</sup> , 289 <sup>4</sup> | 288 <sup>3</sup> , 290 <sup>4</sup> | 291             | 292                 | 293                     | 294                           |
| Размеры              | I–VII  |              |                                     |                                     |                 |                     |                         |                               |
| Длина                | Две длины для гольфов, чулок, колготок и колготок для беременных   |              |                                     |                                     |                 |                     |                         |                               |
| Стопа                | Универсальная для размеров с 36 по 43 — закрытый носок, открытый носок (на заказ; O в конце номера модели)   |              |                                     |                                     |                 |                     |                         |                               |
| Резинка              | <sup>3</sup> Резинка трикотажная под пояс, без силикона для моделей 187, 287, 188, 288<br><sup>4</sup> Резинка кружевная на силиконовой основе в виде ленты (FBR) для моделей 189, 190, 289, 290. Для моделей на широкое бедро к номеру модели добавляется буква W. Также для чулок mediven elegance резинка на силиконовой основе в виде капель (NoB), резинка с декоративным узором на силиконовой основе в виде капель (NoM) и резинка на силиконовой основе в виде микро капель для чувствительной кожи (MBs) доступны на заказ. |              |                                     |                                     |                 |                     |                         |                               |
| Выполнение на заказ  | Возможно   |              |                                     |                                     |                 |                     |                         |                               |

#### Стандартные цвета

|          |            |               |
|----------|------------|---------------|
|          |            |               |
| 5 Черный | A Антрацит | 3 Темно-синий |
|          |            |               |
| C Кашмир | 1 Карамель | K Розэ        |
|          |            |               |
| Z Бронза | O Бежевый  | M Магента     |
|          | 7 Белый    |               |

<sup>1</sup> Swarovski® — зарегистрированная торговая марка Swarovski AG.

<sup>2</sup> При выборе колготок с заниженной талией к номеру модели добавляется буква S.

<sup>5</sup> Патент на инновационную гибридную нить.

<sup>6</sup> Проверено дерматологическими испытаниями.

<sup>7</sup> Проверено испытаниями конечных потребителей.



# mediven® plus

mediven plus (МЕДИВЕН ПЛЮС) – компрессионный трикотаж для повседневного использования, особенно в прохладное или холодное время года. Непрозрачный, прочный, с оптимальными компрессионными характеристиками и самым широким спектром моделей трикотажа mediven plus популярен как среди женщин, так и среди мужчин.

- гольфы, чулки, чулок с застежкой на талии, колготки, колготки для беременных, мужское трико 1, 2 и 3 классов компрессии
- модели с закрытым и открытым носком
- укрепленные практичные носочная и пяточная области
- за счет включения в структуру ткани ионов серебра технология Clima Fresh обеспечивает антибактериальный и противогрибковый эффект по всей длине изделия
- непрозрачная текстура ткани скрывает капиллярные сеточки и расширенные вены
- стандартные цвета: черный, антрацит, темно-синий, кашмир, карамель, розэ, бронза, бежевый, магента, белый
- модные сезонные цвета (на заказ)
- узоры с оригинальными кристаллами Swarovski®<sup>1</sup>

Оптимальный выбор на каждый день

Преимущества




<sup>1</sup> Swarovski® — зарегистрированная торговая марка Swarovski AG.  
<sup>2</sup> Проверено дерматологическими испытаниями.

Таблица моделей mediven plus

| Виды изделий         | AD     | AD (M)       | AG                                  | AG (M)                              | AT       | AT (M)         | ATU                     | ATU (M)                       |
|----------------------|--------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
|                      |        |              |                                     |                                     |          |                |                         |                               |
|                      | Гольфы | Гольфы малые | Чулки                               | Чулки малые                         | Колготки | Колготки малые | Колготки для беременных | Колготки для беременных малые |
| 1-й класс компрессии | 101    | 102          | 107 <sup>3</sup> , 108 <sup>4</sup> | 105 <sup>3</sup> , 106 <sup>4</sup> | 109      | 110            | 113                     | 114                           |
| 2-й класс компрессии | 201    | 202          | 206 <sup>3</sup> , 200 <sup>4</sup> | 205 <sup>3</sup> , 199 <sup>4</sup> | 211      | 212            | 213                     | 214                           |
| 3-й класс компрессии | 401    | 402          | 404 <sup>3</sup> , 400 <sup>3</sup> | 403 <sup>3</sup> , 399 <sup>4</sup> | 409      | 410            | 413                     | 414                           |

Стандартные цвета

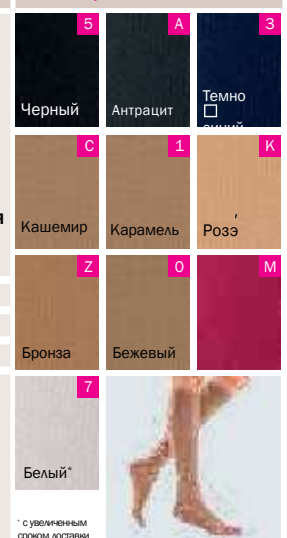

| Виды изделий         | AGW  |       | AGW (M)                          |       | ATM           | ATM (M)             |
|----------------------|--|-------|----------------------------------|-------|---------------|---------------------|
|                      |  |       |                                  |       |               |                     |
|                      | Чулоч с застежкой на талии   |       | Чулоч с застежкой на талии малый |       | Трико мужское | Трико мужское малое |
|                      | правый   | левый | правый                           | левый |               |                     |
| 1-й класс компрессии | 117  | 119   | 118                              | 120   | 115           | 116                 |
| 2-й класс компрессии | 207  | 209   | 208                              | 210   | 215           | 216                 |
| 3-й класс компрессии | 405  | 406   | 407                              | 408   | 415           | 416                 |
| Размеры              | I – VII  |       |                                  |       |               |                     |
| Длина                | две длины для гольфов, чулок, колготок, колготок для беременных и мужского трико                 |       |                                  |       |               |                     |
| Стопа                | универсальная для размеров с 36 по 43 — закрытый (С в конце номера модели) носок, открытый носок |       |                                  |       |               |                     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Резинка             | <sup>3</sup> Резинка трикотажная под пояс, без силикона для моделей 107, 105, 206, 205, 404, 403<br><sup>4</sup> Резинка на силиконовой основе в виде капель (NoB) для моделей 108, 200, 400, 106, 199, 399. Для моделей на широком бедре к номеру модели добавляется буква W. Также для чулок mediven plus резинка с декоративным узором на силиконовой основе в виде капель (NoM), резинка на силиконовой основе в виде микро капель для чувствительной кожи (MBs) и резинка кружевная на силиконовой основе в виде ленты (FBR) доступны на заказ. |
| Выполнение на заказ | возможно   |

- Новая Y-образная область пятки: легче надевать, бо́льшая стабильность, комфорт в течение всего дня
- Новая рифленая подошвенная часть (в области наибольшего трения): бо́льшая стабильность (не скользит в обуви), повышенная износостойкость.
- Новая усиленная и более эластичная носочная область: повышенная износостойкость, бо́льшая свобода для пальцев.
- Новая широкая (до 5 см) резинка для гольфов: повышенный комфорт и надежная фиксация в течение всего дня.



## mediven® active

Гольфы mediven active (МЕДИВЕН АКТИВ) – новая звезда в компрессионном портфолио компании medi. Эти лечебные гольфы 1-го и 2-го классов компрессии разработаны специально для активных мужчин: изделия идеально подходят для работы и досуга, в особенности при высоких нагрузках на ноги.

- современный дизайн с привлекательной рифленой и непрозрачной текстурой
- дышащий материал, отличные влагоотводящие свойства
- высокий уровень комфорта при длительном ежедневном использовании
- гольфы с закрытым носком
- широкая и мягкая резинка
- укрепленные очень мягкие и комфортные носочная, пяточная и подошвенная области
- стандартные цвета: черный, антрацит, темно-синий, белый, темно-коричневый


Для активных мужчин

Преимущества




\* iF product design award (АЙ ЭФ ПРОДАКТ ДИЗАЙН ЭУОРД) – логотип, обозначающий знак качества, известный по всему миру. Такая награда присуждается победителям ежегодного международного конкурса промышленного дизайна, который проводится более 60 лет.

Таблица моделей mediven active

| Виды изделий         | AD   | AD (M) |
|----------------------|--|--------|
|                      |                   | Гольфы |
| 1-й класс компрессии | 3540   | 3547   |
| 2-й класс компрессии | 3640   | 3647   |
| Длина                | две длины: стандартная AD 43–49 см, малая AD 37–42 см  |        |
| Стопа                | с закрытым носком, универсальная<br>малая длина – размеры 38–42<br>стандартная длина – размеры 43–48 |        |
| Выполнение на заказ  | –  |        |

Стандартные цвета

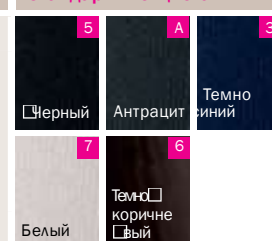





## mediven® comfort

Модельный ряд mediven comfort (МЕДИВЕН КОМФОРТ) предназначен для тех, кто любит и ценит удобство и комфорт. Сочетание медицинской эффективности и мягкости изделий значительно облегчает надевание и снятие трикотажа, обеспечивая при этом необходимый лечебный эффект и комфорт при использовании в течение всего дня.

- гольфы, чулки и колготки 1 и 2 классов компрессии
- модели с закрытым и открытым носком
- укрепленные практичные носочная и пяточная области
- кружевная и обычная резинки на силиконовой основе для чулок
- стандартные цвета: черный, антрацит, темно-синий, кашемир, карамель, роза, бронза, бежевый
- модные сезонные цвета (на заказ)
- ткань изделий обработана ланолином, оказывающим защитное действие на кожу (эффект сохраняется даже после 100 стирок)

Легче надевать и снимать

Преимущества



<sup>1</sup> «1.0» — лучшая оценка уровня комфорта во время использования изделия по версии авторитетного и немецкого института Hohenstein Institute (ХОЕНШТАЙН ИНСТИТИУТ)

| Таблица моделей mediven comfort |   |                |  |  |                | Стандартные цвета |         |          |                                 |                |
|---------------------------------|---|----------------|--|--|----------------|-------------------|---------|----------|---------------------------------|----------------|
| Виды изделий                    | AD  | AD (M)         | AG   | AG (M)   | AT             | AT (M)            | S       | A        | Z                               |                |
|                                 |   |                |  |  |                |                   | Черный  | Антрацит | Темно-синий                     |                |
|                                 | Гольфы  | Гольфы малые   | Чулки  | Чулки малые  | Колготки       | Колготки малые    | Кашемир | Карамель | Роза*                           |                |
| 1-й класс компрессии            | C0140<br>CC140  | C0147<br>CC147 | C0169 <sup>3</sup><br>C0161 <sup>2</sup><br>CC169 <sup>3</sup><br>CC161 <sup>2</sup> | C0159 <sup>3</sup><br>C0151 <sup>2</sup><br>CC159 <sup>3</sup><br>CC151 <sup>2</sup> | C0110<br>CC110 | C0117<br>CC117    | Бронза* | Бежевый* | * с увеличенным сроком доставки |                |
| 2-й класс компрессии            | C0240<br>CC240  | C0247<br>CC247 | C0269 <sup>3</sup><br>C0261 <sup>2</sup><br>CC269 <sup>3</sup><br>CC261 <sup>2</sup> | C0259 <sup>3</sup><br>C0251 <sup>2</sup><br>CC259 <sup>3</sup><br>CC251 <sup>2</sup> | C0210<br>CC210 | C0217<br>CC217    |         |          | Открытый носок                  | Закрытый носок |
| Размеры                         | I–VII   |                |  |  |                |                   |         |          |                                 |                |
| Длина                           | две длины для гольфов, чулок и колготок   |                |  |  |                |                   |         |          |                                 |                |
| Стопа                           | универсальная для размеров с 36 по 43 — закрытый (CC) носок, открытый (CO) носок  |                |  |  |                |                   |         |          |                                 |                |
| Резинка                         | <sup>2</sup> Резинка кружевная на силиконовой основе в виде ленты (FBR) для моделей 151, 161, 251, 261<br><sup>3</sup> Резинка на силиконовой основе в виде капель (NoB) для моделей 159, 169, 259, 269. Для моделей на широкое бедро к номеру модели добавляется буква W. Также для чулок mediven comfort резинка с декоративным узором на силиконовой основе в виде капель (NoM) и резинка на силиконовой основе в виде микро капель для чувствительной кожи (MBs) доступны на заказ. |                |  |  |                |                   |         |          |                                 |                |
| Выполнение на заказ             | возможно  |                |  |  |                |                   |         |          |                                 |                |





# Инструкция по подбору лечебного трикотажа

Размер изделия нужно подбирать строго по индивидуальным анатомическим меркам конечности пациента. Верхний край лечебного трикотажа должен располагаться на 5–10 см выше уровня поражения вены. При склонности к отекам пациенту необходимо производить измерения утром сразу после пробуждения.

- cb – длина окружности самой узкой части голени над лодыжками
- ch – длина окружности самой широкой части голени
- cd – длина окружности голени ниже подколенной складки на ширину двух пальцев пациента
- cg – длина окружности бедра, на 5 см ниже промежности
- ch – длина окружности самой широкой части бедер
- ct – длина окружности талии
- AD – длина от пятки до линии измерения cd
- AG – длина от пятки до линии измерения cg

Лечебный компрессионный трикотаж 3 класса компрессии (иногда) и 4 класса компрессии (всегда) требует снятия дополнительных мерок и изготавливается на заказ. Размер изделия определяется с помощью таблиц размеров medi.

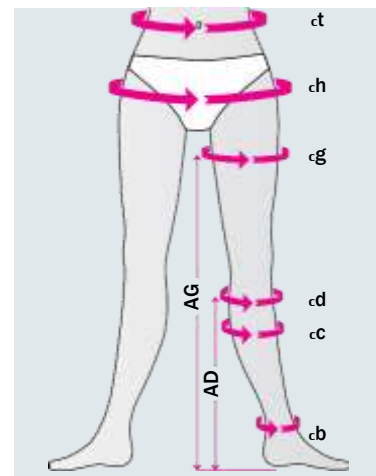


Таблица размеров для модельных рядов mediven elegance\*, mediven plus\*\*, mediven active и mediven comfort\*\*\*

| Стандартные размеры   |    | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | Длина, см  |
|---|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Для чулок с резинкой на силиконовой основе при широких бедрах | cg | 49–57 | 53–62 | 57–67 | 61–72 | 65–77 | 69–81 | 73–85 | AG для чулок и колготок стандартная<br>малая       |
| Для чулок с резинкой на силиконовой основе                    | cg | 43–48 | 45–52 | 49–56 | 53–60 | 56–64 | 60–68 | 64–72 |  |
| Для колготок, чулок без силикона и мужского трико             | cg | 43–57 | 45–62 | 49–67 | 53–72 | 56–77 | 60–81 | 64–85 | AD для голффов стандартная<br>малая                |
| Для голффов, чулок, колготок и мужского трико                 | cd | 27–33 | 29–36 | 32–39 | 34–42 | 36–45 | 38–48 | 40–50 |  |
| Для голффов, чулок, колготок и мужского трико                 | cc | 28–34 | 30–37 | 33–40 | 35–43 | 37–46 | 39–49 | 41–51 | AD для голффов mediven active стандартная<br>малая |
| Для голффов, чулок, колготок и мужского трико                 | cb | 18–20 | 20–22 | 22–24 | 24–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 |  |

\* Для стандартных размеров колготок mediven elegance существуют ограничения по длинам окружностей самой широкой части бедер (ch) и талии (ct) соответственно: I–III размеры – до 110 см и 95 см; IV–VII размеры – до 135 см и 120 см. В случае выхода значений ct и ch за рамки указанных значений следует заказывать колготки maxi party top.


\*\* Для стандартных размеров колготок mediven plus существуют ограничения по длинам окружностей самой широкой части бедер (ch) и талии (ct) соответственно: I–III размеры – до 110 см и 95 см; IV–V размеры – до 135 см и 120 см; VI–VII размеры – до 145 см и 140 см. В случаях выхода значений ct и ch за рамки указанных ограничений следует заказывать колготки maxi party top.

\*\*\* Для стандартных размеров мужского трико mediven plus существуют ограничения по длинам окружностей самой широкой части бедер (ch) и талии (ct) соответственно: I–VII размеры – до 145 см и 125 см.


\*\*\* Для стандартных размеров колготок mediven comfort существуют ограничения по длинам окружностей самой широкой части бедер (ch) и талии (ct) соответственно: I–III размеры – до 130 см и 125 см; IV–VII размеры – до 135 см и 125 см.

## Помощник в надевании

medi Butler (МЕДИ БАТЛЕР) – простое приспособление, которое решает проблему надевания компрессионного трикотажа у пожилых и ослабленных пациентов, экономит силы и время.

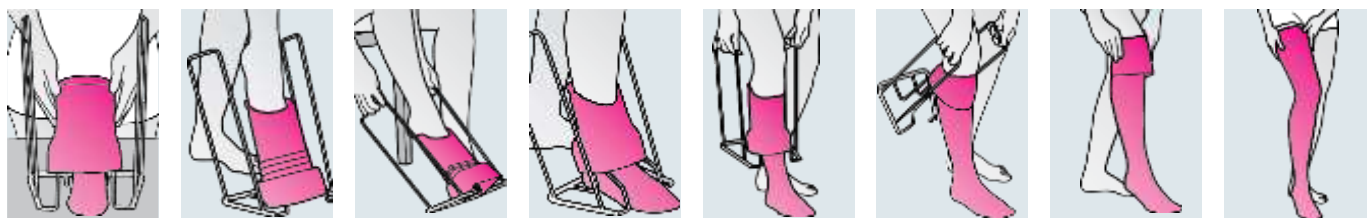


medi Butler Off (МЕДИ БАТЛЕР ОФ) – простой и удобный в использовании рожек с удлиненной ручкой для снятия компрессионного трикотажа.

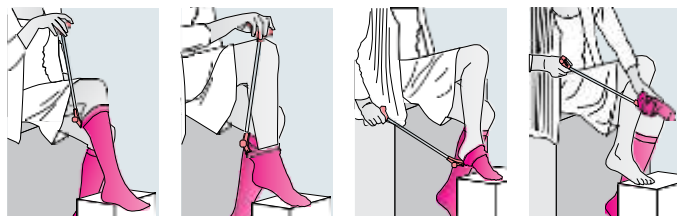


# Рекомендации по снятию мерок




**cб** – длина окружности самой узкой части голени над лодыжками

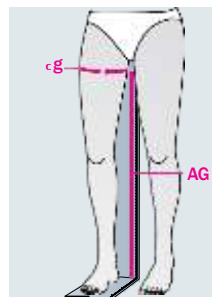


**cг** – длина окружности бедра, на 5 см ниже промежности  
**AG** – длина от пятки до измерения cг

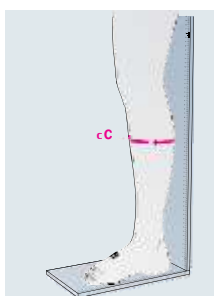

**cс** – длина окружности самой широкой части голени

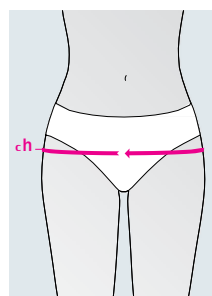

**ch** – длина окружности самой широкой части бедер

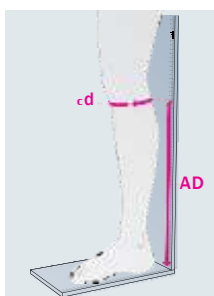

**cd** – длина окружности голени ниже подколенной складки на ширину двух пальцев пациента  
**AD** – длина от пятки до измерения cd



**ct** – длина окружности талии

## Особые указания

Никогда не подворачивайте верхний край изделия: это приводит к локальному повышению давления (так называемому эффекту жгута), ухудшению кровотока и неприятным ощущениям.

Если у Вас влажная кожа, используйте тальк, чтобы компрессионные гольфы, чулки или колготки лучше скользили. Будьте осторожны, если у Вас длинные ногти или если Вы носите кольца.

Чтобы избежать повреждений при надевании компрессионного трикотажа, целесообразно использовать резиновые перчатки.

Шершавая и ороговевшая кожа на пятках может быть причиной повреждения трикотажа, так как в процессе надевания пятка скользит через узкую часть изделия.

Пожалуйста, следите за тем, чтобы внутренняя поверхность Вашей обуви была в хорошем состоянии, так как ее дефекты могут привести к повреждению изделия.

Компрессионный трикотаж medi устойчив к различным мазям, кремам и увлажнителям кожи, однако некоторые их комбинации со временем могут привести к снижению прочности изделия. Также при использовании кремов, мазей и масел для тела возможно снижение фиксирующей способности резинки на силиконовой основе у чулок.

Консультанты специализированных салонов дадут Вам рекомендации, как правильно надевать и снимать изделие лечебного трикотажа, ухаживать за ним. Пожалуйста, следуйте этим рекомендациям.

## Рекомендации по уходу

Первый раз стирайте Ваше компрессионное изделие отдельно от другого белья. Компрессионный трикотаж следует стирать ежедневно вручную или в стиральной машине (40 °C) в деликатном режиме.

Используйте моющие средства для цветного белья, не содержащие отбеливатели и кондиционеры. После стирки многократно прополощите компрессионное изделие, аккуратно отожмите руками или в стиральной машине, используя деликатный режим, и повесьте сушиться в хорошо проветриваемом месте. Не оставляйте влажные компрессионные изделия лежать на полотенце или под прямыми солнечными лучами. Не сушите компрессионный трикотаж на отопительной батарее, не подвергайте химической чистке.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА.

medi RUS  
МОСКВА  
(495) 921-39-37  
info@medirus.ru  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
(812) 595-00-95  
spb@medirus.ru  
НОВОСИБИРСК  
(383) 207-91-41  
novosibirsk@medirus.ru  
www.medirus.ru  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
ПО РОССИИ 8-800-250-39-37

900265/09.20/10

medi



## Компрессионный трикотаж mediven® – стильный, яркий, эффективный

Индивидуальность и шарм с новой коллекцией сезонных цветов  
и узоров из кристаллов Swarovski®.

Обзор цветов mediven® круговой вязки 2020-2021.



medi. I feel better.



# Обзор цветов mediven® круговой вязки 2020-2021


| Стандартные цвета         | mediven elegance | mediven comfort | mediven plus   | mediven forte  | mediven active |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Black (черный)            | ●                | ●               | ●              | ●              | ●              |
| Anthracite (антрацит)     | ●                | ●               | ●              | ●              | ●              |
| Navy (темно-синий)        | ●                | ●               | ●              | ●              | ●              |
| Cashmere (кашемир)        | ●                | ●               | ●              | ●              |                |
| Caramel (карамель)        | ●                | ●               | ●              | ●              |                |
| Rosé (розэ)               | ●                | ● <sup>o</sup>  | ●              | ● <sup>o</sup> |                |
| Bronze (бронза)           | ●                | ● <sup>o</sup>  | ●              | ● <sup>o</sup> |                |
| Beige (бежевый)           | ●                | ● <sup>o</sup>  | ●              | ● <sup>o</sup> |                |
| medi Magenta (магента)    | ● <sup>o</sup>   |                 | ● <sup>o</sup> |                |                |
| White (белый)             | ● <sup>o</sup>   |                 | ● <sup>o</sup> |                | ●              |
| Brown (темно-коричневый)  |                  |                 |                |                | ●              |
| <b>Сезонные цвета</b>     |                  |                 |                |                |                |
| Cherry-red (спелая вишня) | ●*               | ●*              | ●*             | ●*             |                |
| Blue-Jeans (блю-джинс)    | ●*               | ●*              | ●*             | ●*             |                |
| Violet (фиолетовый)       | ●*               | ●*              | ●*             | ●*             |                |
| Grey (серый)              | ●*               | ●*              | ●*             | ●*             |                |

o Стандартные цвета с увеличенным сроком доставки.

\* Сезонные цвета с увеличенным сроком доставки. Возврат невозможен.

## Узоры из кристаллов Swarovski®\*\*

Узоры из кристаллов Swarovski доступны для модельных рядов mediven elegance, mediven comfort, mediven plus, mediven forte и всех компрессионных изделий плоской вязки для нижних и верхних конечностей.

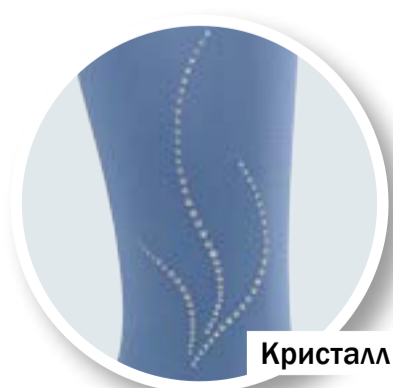

Медицинский компрессионный трикотаж mediven® круговой вязки используется для компрессионной терапии нижних конечностей, как правило, для профилактики и лечения хронических заболеваний вен.

\*\* Swarovski® - зарегистрированная торговая марка Swarovski AG.

## Функциональность, эстетика и комфорт

Новая коллекция mJ-1 — это компрессионный трикотаж с физиологическим распределением давления для здоровых людей. Почему именно mJ-1? Если Вы заботитесь о своем здоровье, то ответ очевиден:

**mJ-1** — это гармоничное сочетание функциональности, привлекательного внешнего вида и комфорта при использовании;

**mJ-1** — это более современная и эффективная альтернатива обычному поддерживающему профилактическому трикотажу с давлением ниже 1-го класса компрессии (ниже 18 мм рт. ст.);

**mJ-1** — это отличное настроение, хорошее самочувствие, здоровье и красота Ваших ног.

## Компрессионные технологии medi



**medi compression** — знак качества, олицетворяющий инновационную и высокотехнологичную продукцию компании medi для хорошего самочувствия в повседневной жизни, медицине и спорте.




Clima Comfort

**Clima Comfort** — запатентованная технология вязки из уникальных дышащих материалов обеспечивает оптимальный водный и температурный баланс кожи в любое время года.



Clima Fresh

Зapatентованная технология **Clima Fresh** обеспечивает антибактериальный эффект и препятствует образованию неприятного запаха.

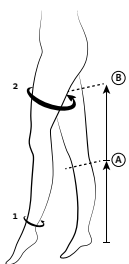

## Подбор размера

**Измерения для подбора размера гольфов:**

длина окружности голени над лодыжками (1), длина ноги от основания стопы до уровня на два пальца ниже подколенной складки (A).

**Измерения для подбора размера чулок и колготок:**

длина окружности голени над лодыжками (1), длина окружности верхней трети бедра на 5 см ниже промежности (2), длина ноги от стопы до измерения 2 (B).

**Область стопы:** универсальная для размеров 36–43.

| Размер                                   | S        | M        | L        | L+       |
|--|----------|----------|----------|----------|
| (1) Длина окружности над лодыжками       | 18–20 см | 20–23 см | 23–26 см | 26–29 см |
| (2) Длина окружности верхней трети бедра | 46–54 см | 52–62 см | 56–66 см |          |

| Длина | Для гольфов | Для чулок и колготок |
|-------|-------------|----------------------|
| L1    | < 38 см     | < 72 см              |
| L2    | > 38 см     | > 72 см              |



medi RUS

МОСКВА  
(495) 921-39-37  
info@medirus.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
(812) 595-00-95  
spb@medirus.ru

НОВОСИБИРСК  
(383) 207-91-41  
novosibirsk@medirus.ru

www.medirus.ru

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 8-800-250-39-37

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО  
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА.



medi

# mJ-1

Компрессионный трикотаж  
для современной жизни



900239/11.20/10

medi. I feel better.



## mJ-1: компрессионный трикотаж для современной жизни



**mJ-1 city**  
 Гольфы  
 с гладкой текстурой  
 Размеры: S, M, L  
 2 длины:  
 L1<38 см  
 L2>38 см  
 77% полиамид  
 23% эластан

джет-блэк  
 оксид  
 нерреа



**mJ-1 cato**  
 Гольфы мужские  
 с зернистой  
 текстурой  
 Размеры: S, M, L, L+  
 2 длины:  
 L1<38 см  
 L2>38 см  
 82% полиамид  
 18% эластан

джет-блэк  
 оксид  
 нерреа



**mJ-1 metropole**  
 Гольфы прозрачные  
 с гладкой текстурой  
 Размеры: S, M, L  
 2 длины:  
 L1<38 см  
 L2>38 см  
 66% полиамид  
 34% эластан

джет-блэк  
 димгрей  
 нерреа  
 хани  
 мейк-ап  
 перл  
 кэнди



**mJ-1 metropole**  
 Чулки с кружевной  
 резинкой на силиконовой  
 основе «платинум»  
 прозрачные с гладкой текстурой  
 Размеры: S, M, L  
 2 длины:  
 L1<72 см  
 L2>72 см  
 66% полиамид  
 34% эластан

джет-блэк  
 димгрей  
 нерреа  
 хани  
 мейк-ап  
 перл  
 кэнди



**mJ-1 metropole**  
 Колготки прозрачные  
 с гладкой текстурой  
 Размеры: S, M, L  
 2 длины:  
 L1<72 см  
 L2>72 см  
 62% полиамид  
 38% эластан

джет-блэк  
 димгрей  
 нерреа  
 хани  
 мейк-ап  
 перл  
 кэнди

Некоторое несоответствие оригинальным цветам в этом лифлете обусловлено особенностями типографской печати. Для получения достоверного представления, пожалуйста, спрашивайте оригинальные образцы цветов в специализированных салонах.